



巴德爾醫療輔具

☎ 06-5899061

☎ 06-5899060

🌐 www.baldur.com.tw

✉ sales@baldur.com.tw

📍 台南市新市區光華街5-56號

⁺BALDUR

iOpen居家輔助手(拉拉手) 產品使用說明書



產品結構



穿戴說明&細節調整



← 掃QR Code即可觀看
使用穿戴說明以及
細節調整步驟影片~

內容物

*居家輔助手主體X1、說明書、保固卡。

用途效能

- *適合手部因張力或其他原因導致有肌肉攣縮風險時使用，可協助患者於家中自行進行加強手部牽拉。
- *協助患者手部擺位在正中位置，預防肌腱攣縮變形。

清洗方式

- *建議使用濕抹布或酒精擦拭並自然風乾即可。

注意事項

- *請依照說明影片指示穿戴，以達到產品完整功效。
- *連續穿戴時間過長可能會導致血液循環不良，建議每半小時應放鬆手腕關節及手指彈性繩，讓手部休息5~10後再繼續拉伸。
- *每次使用後請檢視手部皮膚壓力狀況(紅腫破皮)。
- *有任何不適情況產生時，應立即停止使用，請詢問專業醫療人員或致電本公司詢問。

不建議使用

- *手部關節僵硬變形，有角度受限情形時。
- *嚴重末梢肢體循環障礙(嚴重水腫、感覺異常)。